

Charging base handleiding



Hartelijk dank

Hartelijk dank dat u voor deze oplaadbare oplossing hebt gekozen.

Introductiejaar: 2017

Uw charging base

Uw hoorspecialist: _____

Telefoonnummer: _____


Serienummer: _____

Garantie: _____

Aankoopdatum: _____

Korte beschrijving

- 1 **Charging base** - laadt uw oplaadbare hoortoestellen op wanneer u deze niet gebruikt
- 2 **Lampjes** - als de lampjes groen knipperen, betekent dit dat uw hoortoestellen worden opgeladen
Wanneer de lampjes continu groen branden, zijn uw hoortoestellen volledig opgeladen
- 3 **Oplaadsleuven** - plaats uw hoortoestellen zo in de oplaadsleuven dat de domes van beide hoortoestellen naar de kant van de charging base wijzen waar ook de voedingskabel uitkomt
- 4 **Voedingskabel** - aan te sluiten op een stopcontact via de USB-wandadapter

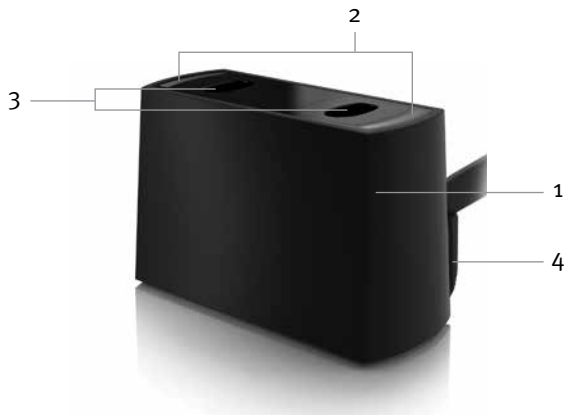

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Bedieningsinstructies	4
Uw charging base onderhouden.....	6
Gids voor probleemoplossing.....	8
Technische gegevens	9
Informatie over en uitleg van symbolen	10
Extra aantekeningen.....	12

Waarschuwingen

- ⚠ Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen. Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- ⚠ Zorg dat de lange voedingskabel zich niet in een looproute bevindt in verband met struikelgevaar.
- ⚠ De oplader bevat magneten en moet minstens 15 cm bij pacemakers uit de buurt worden gehouden.
- ⚠ Het apparaat bevat een lange voedingskabel die bij verkeerd gebruik wurging kan veroorzaken.
- ⚠ Zwaai de oplader niet aan de voedingskabel heen en weer.
- ⚠ Risico op elektrische schokken door incompatibele onderdelen. Gebruik de USB-wandadapter die bij de oplader is meegeleverd. De oplader mag alleen door bevoegd personeel worden gerepareerd.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve of in zuurstof verrijkte omgevingen.
- ⚠ Mochten de magneten gescheiden raken van de oplader, steek ze dan niet in de neus

of mond. Ingeslikte magneten kunnen in de ingewanden blijven kleven en tot ernstig letsel of de dood leiden. Raadpleeg onmiddellijk een arts als magneten worden ingeslikt of ingeademd.

- ⚠ Gebruik alleen een door fabrikant goedgekeurde oplader. Als andere opladers zijn toegestaan, worden de specificaties hiervoor in de handleiding vermeld (zo zijn IEC60950 en IEC60065 gecertificeerd met een minimaal uitgangsvermogen van 5 V DC en 0,5 A/500 mA).
- ⚠ Zorg dat hoortoestellen schoon en droog zijn voordat ze worden opgeladen.
- ⚠ Deze oplader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- ⚠ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.
- ⚠ Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- ⚠ Dompel het apparaat niet onder in water.
- ⚠ Plaats het apparaat niet in een magnetron.
- ⚠ Let op dat de charging base alleen wordt gebruikt met het juiste type hoortoestel, zoals is aangegeven door uw hoorspecialist.

Bedieningsinstructies


Deze charging base is bedoeld voor het opladen van uw oplaadbare hoortoestellen. Gebruik het alleen met oplaadbare batterijen van het type AgZn (zilver-zink). Dit apparaat heeft geen aan/uit-knop. Het wordt ingeschakeld wanneer u de voedingskabel aansluit.

Als u het apparaat wilt inschakelen, sluit dan de voedingskabel aan op de USB-wandadapter en op een stopcontact. Wanneer het apparaat is aangesloten, lichten de beide lampjes op de oplader kort groen op.


Uw hoortoestel opladen

1. Houd uw hoortoestellen voorzichtig bij het slangetje vast en plaats ze in de oplaadsleuven. De beide domes moeten naar de kant van de lader wijzen waar ook de voedingskabel uitkomt, net als in de afbeelding wordt getoond.

Als uw hoortoestellen correct zijn geplaatst, beginnen beide lampjes groen te knipperen.

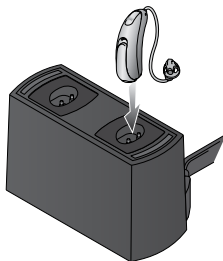

2. Wanneer de groene lampjes 5 keer hebben geknipperd, betekent dit dat uw hoortoestellen worden opgeladen. Wanneer de lampjes stoppen met knipperen en continu groen blijven branden, zijn uw hoortoestellen volledig opgeladen. Dit duurt ongeveer 5-7 uur.

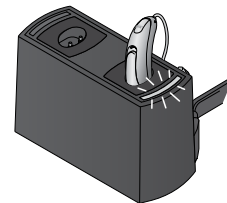

3. U kunt uw hoortoestellen verwijderen voordat ze volledig zijn opgeladen, maar ze gaan dan minder lang mee dan wanneer u ze volledig oplaadt. U kunt uw hoortoestellen het beste in de oplader laten zitten wanneer u ze niet gebruikt. Ze raken hierdoor niet overladen.

Uw charging base onderhouden

Tips voor het opladen

- Laad de hoortoestellen regelmatig op voordat u ze gebruikt.
- Laad de hoortoestellen op bij een temperatuur tussen de 10 en 40 °C.
- Indien u van plan bent om uw hoortoestellen een aantal dagen niet te gebruiken, kunt u het beste:
 - De accu's verwijderen, of
 - Laat uw hoortoestellen in de charging base zitten terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.
- Wanneer u een batterij leeg signaal hoort in de hoortoestellen, plaats dan de hoortoestellen in de charging base of vervang de accu's door gewone hoortoestel batterijen.
- Plaats de hoortoestellen niet in de oplader wanneer deze niet is aangesloten. Als u dit toch doet, lopen de accu's leeg.
- Elke accu zou ongeveer een jaar moeten meegaan en kan na deze tijd eenvoudig worden vervangen door uw hoorspecialist.

Reiniging

- Gebruik een zachte, droge tissue om vuil te verwijderen.
- U kunt de zachte borstel die bij hoortoestellen wordt meegeleverd gebruiken om de contactpunten van de oplader schoon te maken.
- Steriliseer of desinfecteer de oplader niet.
- Reinig het apparaat niet met ontsmettingsalcohol, oplosmiddelen of andere vloeistoffen.

Gids voor probleemoplossing

Oorzaak	Mogelijke oplossing
De oplaadlampjes doen niks	
Het hoortoestel is niet correct in de charging base geplaatst	Verwijder verkeerd geplaatste hoortoestellen en plaats deze in de juiste richting
De charging base krijgt geen stroom	Controleer of de USB-kabel goed op de USB-wandadapter is aangesloten Controleer of de USB-wandadapter werkt door er een ander USB-apparaat op aan te sluiten
Het hoortoestel is niet voorzien van een accu	Controleer of er een accu in het hoortoestel zit
De contactpunten van de charging base zijn geblokkeerd	Zorg dat er geen vuil op de contactpunten zit
Eén of beide lampjes branden continu rood	
De accu kan niet worden opgeladen	Controleer of er werkelijk een accu in het hoortoestel zit

Oorzaak	Mogelijke oplossing
Beide lampjes knipperen rood	
De temperatuur is te hoog of te laag. Het opladen wordt gepauzeerd totdat de temperatuur weer binnen het acceptabele bereik ligt	Verplaats de oplader naar een omgeving met een temperatuur tussen de 10 en 40 °C

Neem contact op met uw hoorspecialist als problemen zich blijven voordoen.

Technische gegevens

Specificaties voor de charging base

Bedrijfstemperatuur.....	10 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur.....	-10 °C tot 50 °C
Luchtvochtigheid	20% tot 75%
Bescherming tegen het binnendringen van water	IPX0 (normaal)
Minimale luchtdruk.....	11 kPa
Ingangsspanning USB-wandadapter.....	100-240 V AC
Uitgangsspanning USB-wandadapter	5 V DC
Uitgangsstroom USB-wandadapter	> 0,5 A
USB-wandadapter:	Kuantech KSAS0050500100-VUU (-VKU, -VEU)
Bescherming tegen elektrische schokken	klasse II

Informatie over en uitleg van symbolen



Met het CE-symbool verklaart Unitron dat dit product van Unitron, inclusief accessoires, voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

De getallen achter het CE symbool corresponderen met de code van de gecertificeerde instituten die zijn geconsulteerd volgens de hierboven vermelde richtlijnen.



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante informatie in deze gebruikershandleiding te lezen en te benutten.



Dit symbool geeft aan dat de in deze handleiding beschreven producten voldoen aan de eisen voor een applicatiedeel van type B van EN 60601-1.



Belangrijke informatie over de omgang met het product en het effectieve gebruik.



Copyright-symbool



Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de bevoegde vertegenwoordiger binnen de Europese Unie zijn toegevoegd.



Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de fabrikant (die het apparaat op de markt brengt) zijn toegevoegd.

Gebruiksomstandigheden:

Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het zonder problemen of beperkingen functioneert zoals bedoeld, tenzij anders aangegeven in deze gebruikershandleidingen.

Raadpleeg voor aanvullende informatie het gedeelte Technische gegevens op pagina 9.



Het symbool van een vuilnisbak met een kruis moet u erop attenderen dat dit apparaat niet mag worden verwijderd als gewoon huishoudelijk afval. Deponeer oude of ongebruikte apparaten op stortplaatsen voor elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw hoorspecialist voor verwijdering. Een juiste manier van verwijderen beschermt het milieu en de gezondheid.

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


National Hearing Services Inc.
Unitron Hearing division
20 Beasley Drive, Kitchener, ON
N2E 1Y6 Canada



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Zwitterland





A/2017-09 029-6177-07



7 630034 383881